

**Bobo-test** strumieniowy jest szybkim i prostym w użyciu testem ciążyowym do domowego użytku.

Bobo-test strumieniowy został zaprojektowany tak, aby wykrywać nawet niewielkie ilości hormonu ciążyowego hCG (gonadotropina kosmówkowa) w moczu. Hormon ten jest produkowany przez organizm tuż po zapłodnieniu, a jego poziom wzrasta znacząco w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Jak wykazały badania laboratoryjne poziom wykrywalności hCG w teście to 25mIU/ml z dokładnością >99%. Bobo-test strumieniowy jest wyjątkowo czułym testem. Badania pokazały, że test może wykryć hormon hCG nawet na poziomie 10mIU/ml. Test ciążyowy jest przeznaczony do wykrywania hormonu hCG już w 2-3 dni od momentu wzrostu hCG. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki, test można przeprowadzić o każdej porze dnia.


**Wyrob do samokontroli. Test do diagnostyki in vitro (tylko do użytku zewnętrznego).**

## PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ UŻYCIA PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA

- Jeżeli masz jakieś pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 70 30 11 w godz. 8-16 (pn-pt).
- Nie otwieraj foliowej torebki testu, jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
- Nie używaj testu po przekroczeniu daty ważności wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.
- Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze pokojowej: 3-30°C
- Przechowuj test z dala od dzieci.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera plastikowy test w zapieczętowanej folii oraz instrukcję użycia.

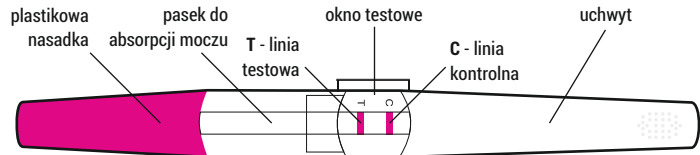

Opis płytki testowej (Rys.1)


**UWAGA:** wewnątrz torebki foliowej znajduje się zaszetka pochłaniająca wilgoć, którą należy wyrzucić

## SPOSÓB UŻYCIA

1. Wymyj test z foliowego opakowania. Następnie zdejmij plastikową nasadkę z paska do absorpcji moczu.  
**Pamiętaj, aby nie dotykać palcami do paska absorpcyjnego.**
2. Test powinien być trzymany za uchwyt tak, aby widoczne było okno testowe. Na 5 sekund skieruj pasek absorpcyjny bezpośrednio na strumień moczu. Jeśli nie możesz utrzymać strumienia moczu przez 5 sekund, możesz umieścić moczu w czystym i suchym pojemniku, a następnie zamoczyć w nim 2/3 paska absorpcyjnego na 10 sekund.
3. Po 5 sekundach trzymania paska absorpcyjnego pod strumieniem moczu należy zakryć pasek absorpcyjny plastikową nasadką. Następnie połóż test na płaskiej powierzchni, aby widzieć okno testowe.
4. Od tego momentu zacznij mierzyć czas. Kiedy moczu zostanie wchłonięty, w oknie testowym w miejscu linii kontrolnej C powinnaś zobaczyć różową linię, która kontroluje działanie testu.
5. Dokładny wynik można odczytać w oknie testowym w **5 minutach** (zob. rys. 2,3,4). Wynik pozytywny (ciąża) powinien pojawić się w czasie krótszym niż 5 min. Natomiast w celu potwierdzenia negatywnego wyniku (brak ciąży) należy poczekać pełne 5 minut. Po odczytaniu wyniku wyrzucić test. W przypadku negatywnego wyniku (brak ciąży) nie należy sugerować się zmianami w okienku testowym po upływie 5 minut, ponieważ na skutek zachodzących reakcji chemicznych wynik pokazany po tym czasie może być zafałszowany.


**UWAGA:** Niezależnie od tego czy jesteś w ciąży czy nie, w **oknie testowym** powinna pojawić się **linia kontrolna C** (rys. 2). Obecność linii informuje, że test działa prawidłowo. Brak **linii kontrolnej C** informuje, że test został przeprowadzony nieprawidłowo. Test należy powtórzyć przy użyciu nowego zestawu testowego.

## INTERPRETACJA WYNIKÓW

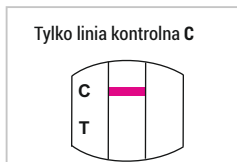


**BRAK CIĄŻY** Rys. 2

Jeśli w oknie testowym pojawi się tylko linia kontrolna C oznacza to, że nie jesteś w ciąży.

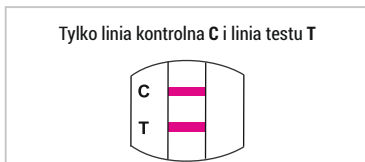

**CIĄŻA** Rys. 3

Jesteś w ciąży, jeśli w oknie testowym pojawią się dwie różowe linie: kontrolna C i testowa T. Nawet jeśli linia testowa T jest ledwo widoczna oznacza ona, że jesteś w ciąży. Kolory obu linii mogą się lekko różnić.

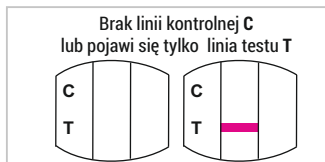

**WYNIK NIEWAŻNY** Rys. 4

Jeśli w ciągu 5 minut w oknie testowym nie pojawi się żadna linia, bądź pojawi się linia testowa T i nie pojawi się linia kontrolna C - wynik nieważny. Należy powtórzyć badanie używając nowego testu.

## ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

### Jak działa test?

**Bobo-test** strumieniowy został zaprojektowany tak, aby wykrywać nawet niewielkie ilości hormonu ciążyowego hCG (gonadotropina kosmówkowa) w moczu. Hormon ten jest produkowany przez organizm tuż po zapłodnieniu, a jego poziom wzrasta znacząco w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Jak wykazały badania laboratoryjne poziom wykrywalności hCG w teście to 25mIU/ml z dokładnością >99%. **Bobo-test** strumieniowy jest wyjątkowo czułym testem. Badania pokazały, że test może wykryć hormon hCG nawet na poziomie 10mIU/ml. Test ciążyowy jest przeznaczony do wykrywania hormonu hCG już w 2-3 dni od momentu wzrostu hCG.

### Kiedy można wykonać test?

Odczekaj 7 dni po stosunku zanim przeprowadzisz test. Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Pozytywny wynik znaczy, że jesteś w ciąży, natomiast negatywny powinien być powtórzony w dniu spodziewanej miesiączki.

### Czy do przeprowadzenia testu można użyć pojemnika?

Tak, jeżeli próbka moczu jest gromadzona w czystym i suchym pojemniku i natychmiast zostanie wykorzystana do przeprowadzenia testu. Zastosuj się wówczas do punktu opisanego w części "Sposób użycia".

### Czy karminie piersią i picie alkoholu mają wpływ na wynik?

Nie.

### Co mam zrobić kiedy wynik jest pozytywny?

Powinnaś skonsultować się z lekarzem ginekologiem. Możesz potwierdzić test robiąc go jeszcze raz po trzech dniach. Pamiętaj, że odpowiednie zachowanie we wczesnej fazie ciąży jest ważne, aby zapewnić zdrowie matce i dziecku.

### Co powinnam zrobić kiedy wynik jest negatywny?

Negatywny wynik testu oznacza, że hormon hCG nie został wykryty i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeśli miesiączka nie pojawi się w ciągu kilku dni możliwe jest, że źle wyczyłaś dzień rozpoczęcia okresu. Wówczas powinnaś powtórzyć test. Jeżeli ponowna próba wskazuje negatywny wynik, a oczekiwana miesiączka nie występuje, powinnaś skontaktować się z lekarzem.

### Jakie czynniki mogą wpływać na wynik testu?

Jeżeli przeprowadzisz test zgodnie z instrukcją użycia wynik testu powinien być dokładny. Jednakże pewne rzadkie choroby i niektóre leki stosowane w leczeniu niepłodności zawierające hormon hCG mogą wpływać na wyniki.

### Co mam zrobić jeśli nie jestem pewna co do koloru linii w oknie testowym?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny (ciąża), w oknie testowym pojawiają się dwie różowe linie w ciągu 5 min. od wykonania testu. Rezultat jest pozytywny bez względu na fakt, jak silny lub słaby jest kolor linii. Jednakże, gdy chcesz się jeszcze bardziej upewnić, powtórz test po 3-4 dniach kiedy poziom hormonu hCG wzrośnie, linie będą ciemniejsze.

### Jakie są wyniki badań klinicznych?



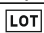






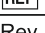


Badania kliniczne były przeprowadzone przy użyciu 100 potwierdzonych próbek. Test pokazał dokładność większą niż 99%, swoistość większą niż 99% i czułość większą niż 99%.

### Czy wynik może się zmienić po dłuższym czasie?

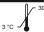Jeżeli w oknie testowym pojawiają się tylko linia kontrolna C (brak ciąży), to po okresie dłuższym niż 5 min. nie należy odczytywać wyniku, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmieniać obraz przeprowadzonego testu.

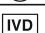Wynik negatywny (brak ciąży) **nie powinien** być odczytany w oknie testowym po 5 minutach okresu oczekiwania. Po 30 minutach część wyników negatywnych może zmienić się w fałszywie pozytywne, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmieniać wynik przeprowadzonego testu.

**Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak, jak z odpadkami. Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.**

 3-30°C	Temperatura przechowywania		Przeczytaj instrukcję
	Numer partii		Do jednorazowego użytku
	Data ważności		Wyrób do diagnostyki in vitro Tylko do użytku zewnętrznego
	Wytwórca		Numer katalogowy
	Nie używać przy uszkodzonym opakowaniu		Data ostatniej aktualizacji
	Chronić przed światłem słonecznym		Chronić przed wilgocią

**Przechowywać w temp. 3-30°C.  
Numer partii i data ważności  
na opakowaniu i etykiecie.**

■ Diagnosis S.A.  
ul. Gen. W. Andersa 38A  
15-113 Białystok, Polska  
Bezpłatna infolinia: 800 70 30 11  
www.diagnosis.pl



0031



0197

Rev. 2015.10.27