

TEST CIĄŻOWY

| PŁYTKOWY |

DOMOWY TEST CIĄŻOWY JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU O CZUŁOŚCI 25 mIU/ml.

WYRÓB DO SAMODZIELNEGO ZASTOSOWANIA.
TEST DO DIAGNOSTYKI IN VITRO.

PRZED PRZEPROWADZENIEM
TESTU CIĄŻOWEGO NALEŻY UWAGNIE
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA.

DOKŁADNOŚĆ TESTU WYNOŚI 99%

Test ciążyowy płytkowy to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążyowy do domowego użytku.

Wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu.

W celu uzyskania najbardziej wiarygodnego wyniku test należy wykonać po pierwszym dniu spodziewanej miesiączki.

Test można wykonać o każdej porze dnia, jednakże do przeprowadzenia testu zalecane jest użycie pierwszego porannego moczu.

PRZED PRZEPROWADZENIEM TESTU:

- Uważnie przeczytaj instrukcję użycia. Jeżeli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 70 30 11 w godz. 8-16 (pn-pt).
- Nie otwieraj foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
- Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
- Test wyłącznie do diagnostyki in vitro (stosować tylko do użytku zewnętrznego).
- Test należy przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.
- Nie wolno zamrażać testu.
- Jeżeli nie możesz wykonać testu tuż po pobraniu próbki moczu, możesz próbkę przechować przez 3 dni w temperaturze 2-8°C (np. w lodówce). Przed wykonaniem testu próbka powinna przebywać ok. pół godziny w temperaturze pokojowej.
- Test należy chronić przed dziećmi.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

JAK DZIAŁA TEST?

Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa). Test ciążyowy płytkowy wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu HCG co może stwierdzić ciążę lub jej brak.


Test ciążyowy płytkowy jest wyjątkowo czuły i jest w stanie wykryć obecność HCG już przy stężeniu 25 mIU/ml.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA TESTU

W opakowaniu testu znajduje się:

1. Instrukcja użycia
2. Płytk testowa
3. Pipetka
4. Pochłaniacz wilgoci

(UWAGA: wewnątrz torebki foliowej znajduje się saszetka pochłaniająca wilgoć, którą należy wyrzucić)

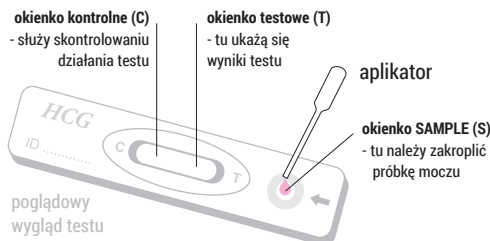

SPOSÓB UŻYCIA

1. Zanim przeprowadzisz test zbierz próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika ze szkła lub plastiku.
2. Wyjmij foliową torebkę z opakowania testu.
3. Rozerwij torebkę wzdłuż nacięcia i wyjmij płytkę testową i pipetkę.
4. Zanurz końcówkę pipetki w pojemniku z próbką moczu.
5. Ścisnąc szeroką część pipetki nabierz próbkę moczu.
6. Trzymając pipetkę z próbką moczu pionowo nad okienkiem SAMPLE (S) umieść w nim dokładnie 4 krople moczu. Uważaj, aby nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza.
7. Po 3-5 minutach odczytaj wynik, a następnie wyrzuć test.

UWAGA: Jeżeli w oknie testowym pojawia się tylko linia kontrolna C (brak ciąży), to po okresie dłuższym niż 5 minut nie należy odczytywać wyniku, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić obraz przeprowadzonego testu.

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

Wynik pozytywny ciąży

Jeżeli w okienku kontrolnym (C) oraz w okienku testowym (T) pojawiły się linie (nawet jeżeli któraś z linii jest mniej wyraźna) oznacza to, że jesteś w ciąży. Skonsultuj się z lekarzem w celu potwierdzenia wyniku.

Wynik negatywny brak ciąży

Jeżeli linia pojawiła się tylko w okienku kontrolnym (C) oznacza to, że nie jesteś w ciąży.

Wynik nieważny

Wynik uznajemy za nieważny jeśli w ciągu 5 minut:

1. Pojawi się linia tylko w oknie testowym (T) i nie pojawi się w oknie kontrolnym (C)
2. Nie pojawi się żadna linia w oknie testowym (T) oraz w oknie kontrolnym (C)

W obu przypadkach wynik uznajemy za błędny, a test należy powtórzyć przy użyciu nowego testu po 48 godzinach.

ODCZYT WYNIKU



CIĄŻA



BRAK CIĄŻY



WYNIK NIEWAŻNY



ODPOWIEDZI NA EWENTUALNE PYTANIA

Czy różnica w natężeniu koloru linii kontrolnych testu ma znaczenie?

Nie. Różnice w kolorze linii nie mają znaczenia dla uzyskanego wyniku testu.

Czy wyniki można interpretować po okresie dłuższym niż 5 minut?

Nie. Wynik testu należy odczytać w ciągu 5 minut. O ile wynik pozytywny nie powinien ulec zmianie nawet w ciągu kilku dni o tyle wskazanie negatywne może zmienić się w wynik fałszywie pozytywny już w kilka minut po upływie zalecanego czasu odczytu wyników.

Czy jeżeli w czasie wykonywania testu podłoże zabarwiło się na różowo a w strefie odczytu pojawiły się pionowe prążki oznacza to objaw nieprawidłowy?

Nie. Próbkę moczu różni się pod względem składu chemicznego. Różnice dotyczą także wilgotności powietrza. Te odmienne warunki chemiczno - fizyczne mogą spowodować pionowe prążkowanie i/lub różowo - czerwone zabarwienie podłoża, ale nie ma to wpływu na wynik testu. Ważne jest aby linia kontrolna była widoczna przez 5 min. od wykonania badania co świadczy o prawidłowym działaniu testu.

Ograniczenia

1. Tak jak w przypadku każdej procedury diagnostycznej, ciąża powinna być potwierdzona przez lekarza.
2. Jeżeli próbka moczu ma zbyt niski ciężar właściwy może nie zawierać odpowiedniej ilości hormonu hCG. Jeśli mimo to nadal podejrzewa się wystąpienie ciąży, należy po 48 godz. pobrać kolejną próbkę moczu i wykonać test jeszcze raz.
3. Podwyższony poziom hormonu hCG może być wywołany innym stanem fizjologicznym. Dlatego też stwierdzenie obecności hormonu hCG w próbce moczu nie powinno być traktowane jako potwierdzenie ciąży, o ile nie wykluczy możliwości wystąpienia innych uwarunkowań. Należy skonsultować się z lekarzem.
4. Na podstawie poziomu hormonu hCG nie można odróżnić ciąży prawidłowej od ciąży pozamacicznej. Samoistne poronienie może również zaburzyć wskazania testu. Należy skonsultować się z lekarzem.
5. Leczenie niepłodności oparte na hCG może również zaburzać wskazania testu. Należy skonsultować się z lekarzem.

Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak, jak z odpadkami. Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.

	Temperatura przechowywania		Przeczytaj instrukcję
	Numer partii produkcyjnej		Do jednorazowego użytku
	Data ważności		Ilość testów w zestawie
	Producent / Wytwórca		Numer katalogowy
	Chronić przed wilgocią		Data ostatniej aktualizacji
	Nie używać przy uszkodzonym opakowaniu		Do diagnostyki in vitro - do użytku zewnętrznego
	Chronić przed światłem słonecznym		

**Przechowywać w temp. 4-30°C.
Numer partii produkcyjnej i data ważności
na opakowaniu i etykiecie.**

Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
Bezpłatna infolinia: 800 70 30 11
www.diagnosis.pl

DYSTRYBUTOR: Eurus Sp. z o.o.
ul. Sejneńska 16, 15-399 Białystok
www.eurus.co

