


# OPTILET MINI

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed przystąpieniem do pobrania próbki krwi zapoznaj się z instrukcją użycia.



Nasadka nakłuwacza

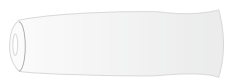

Nasadka przezroczysta, służy do pobrania krwi z miejsc alternatywnych (AST) innych, niż opuszka palca. **Nie używaj nasadki przezroczystej do pobierania krwi z opuszki palca.**

Optilet Mini to bezpieczny i wygodny nakłuwacz, który służy do pobierania próbek krwi kapilarnej do badania poziomu glukozy. Dzięki regulowanej końcówce można dopasować głębokość nakłucia do większości rodzajów skóry. Przed wykonaniem nakłucia należy zawsze umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i dokładnie je wysuszyć.

Urządzenie posiada 6 ustawień głębokości nakłucia (od 1 do 6), przeznaczone do różnych rodzajów skóry. Mniejsze wartości są przeznaczone do nakłuć płytszych, natomiast większe wartości są przeznaczone do nakłuć głębszych. Płytsze nakłucia są odpowiednie dla dzieci i większości dorosłych. Głębsze nakłucia sprawdzają się w przypadku osób z grubszą lub zrogowaciałą skórą. Istnieje również możliwość wykonania nakłucia w miejscach alternatywnych (poza opuszką palca), do tego służy specjalna nasadka.



### UWAGA:

#### DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ JEDNEGO PACJENTA.

To urządzenie nie może być używane do pobierania krwi przez pracowników ochrony zdrowia w placówkach opieki, klinikach i przychodniach, ani nie może być współdzielone z innymi osobami, w tym także z członkami rodziny.


#### NIE NALEŻY PONOWNIE UŻYWAĆ LANCETU.

Użycie ponowne tej samej igły przez osoby trzecie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zagrożenia mikrobiologicznego, może nastąpić zakażenie m.in.: wirusem żółtaczkowy typu B, żółtaczkowy typu C oraz wirusem HIV.

#### Aby zmniejszyć ryzyko infekcji:


- Umyj miejsce nakłucia wodą i mydłem przed pobraniem próbki.
- Utrzymuj urządzenie w czystości. Produkty kosmetyczne, olejki, zanieczyszczenia, pył mogą spowodować jego nieprawidłową pracę.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nakłuwacz, nasadka, lancety i osłona nakłuwacza stwarzają zagrożenie uduszenia.
- Zawsze używaj nowego, czystego lancetu. Lancety są jednorazowe.

## PRZYGOTOWANIE NAKŁUWACZA

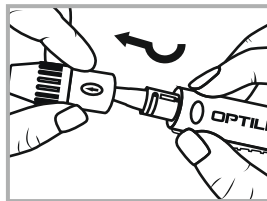


### 1. Ściągnij nasadkę nakłuwacza

Ostrożnie ściągnij nasadkę z nakłuwacza.

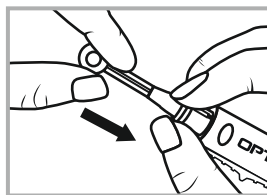


### 2. Umieść lancet

Umieść lancet w nośniku; wciśnij do samego końca.

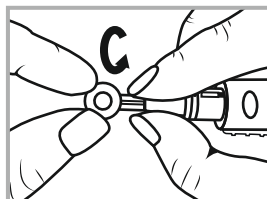


### 3. Ściągnij osłonkę ochronną lancetu

Skręć osłonkę ochronną lancetu, aby oddzielić ją od lancetu. Zachowaj osłonkę ochronną; będzie potrzebna podczas usuwania lancetu.

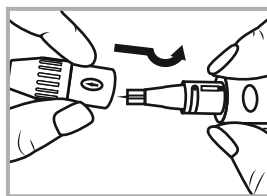

### 4. Załóż nasadkę nakłuwacza

Nałóż nasadkę na urządzenie i dokręć ją dobrze. Uważaj, aby nie dotknąć odsłoniętej igły lancetu.

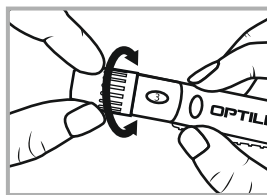


### 5. Regulacja ustawienia głębokości nakłucia

Wybierz pożądaną głębokość nakłucia, aby pozyskać odpowiednią próbkę krwi z jak najmniejszym dyskomfortem. Ustaw głębokość obracając końcówkę nakłuwacza.

Urządzenie posiada 6 ustawień głębokości:


- |      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 1, 2 | dla delikatnej skóry              |
| 3, 4 | dla normalnej skóry               |
| 5, 6 | dla grubej lub stwardniałej skóry |

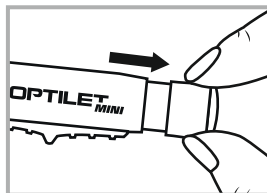

### 6. Odciągnij nasuwaną tuleję nakłuwacza


Odciągnij tuleję, aż usłyszysz kliknięcie.

## NAKŁUWANIE OPUSZKI PALCA

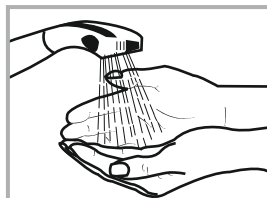

### 1. Umyj ręce


Przed pobraniem próbki krwi umyj ręce i miejsce nakłucia ciepłą wodą i mydłem. Dobrze wypłucz i wysusz ręce.

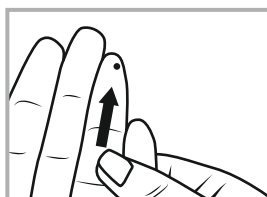


### 2. Pobierz kroplę krwi

Aby uzyskać wystarczającą próbkę krwi rozmasuj energicznie miejsce pobrania. Przyłóż nakłuwacz do palca, z którego ma być pobrana próbka krwi. Wciśnij przycisk zwalniający, żeby wykonać nakłucie.


Odcień nakłuwacz i postępuj dalej zgodnie z instrukcją użycia glukometru.

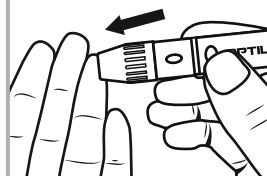


## USUWANIE ZUŻYTEGO LANCETU

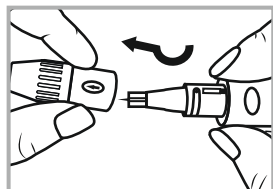


**1. Ściągnij nasadkę nakłuwacza**  
Ostrożnie ściągnij nasadkę z nakłuwacza. Uważaj, aby nie dotknąć odsłoniętego lancetu.

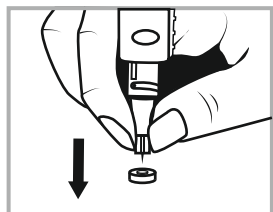


**2. Nałóż osłonkę na lancet**  
Przed usunięciem lancetu połóż osłonkę ochronną lancetu na twardym podłożu, a następnie ostrożnie wkłuj w nią lancet.

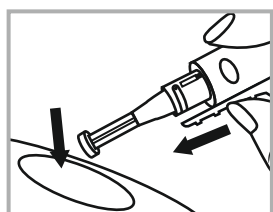

**3. Wysuń lancet**  
Przesuń wyrzutnik lancetu do przodu, aż lancet wysunie się z nakłuwacza. Usuń zużyty lancet.

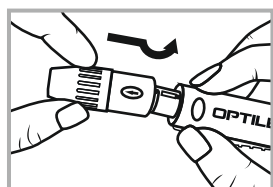


**4. Nałóż nasadkę**  
Nałóż nasadkę nakłuwacza z powrotem na urządzenie.

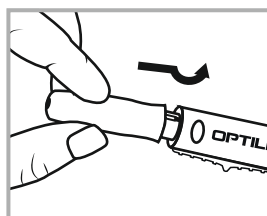


**2. Załóż przezroczystą nasadkę (AST) dla miejsc alternatywnych.**

Załącz przezroczystą nasadkę do miejsc alternatywnych (AST) zamiast nasadki nakłuwacza. W przypadku stosowania nasadki (AST) nie ma potrzeby regulacji głębokości nakłucia.

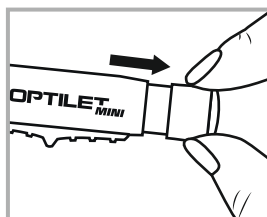


**3. Pociągnij tuleję**  
Pociągnij nasuwaną tuleję do przodu, aż usłyszysz kliknięcie.

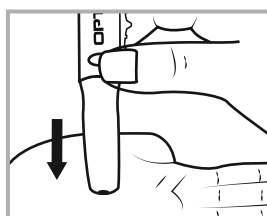

**4. Przytrzymaj przezroczystą nasadkę na skórze.**


Dociśnij stabilnie nakłuwacz i wciśnij przycisk zwalniający, aż w nasadce pojawi się wystarczająca objętość krwi.

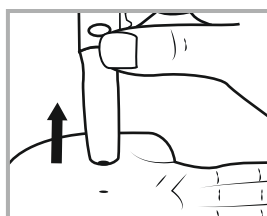

**5. Ostrożnie unieś nakłuwacz pionowo w górę.**

Uważaj, aby nie rozmazać próbki krwi w miejscu nakłucia. Nanieś kroplę krwi na pasek testowy.


## NAKŁUWANIE W MIEJSCU ALTERNATYWNYM

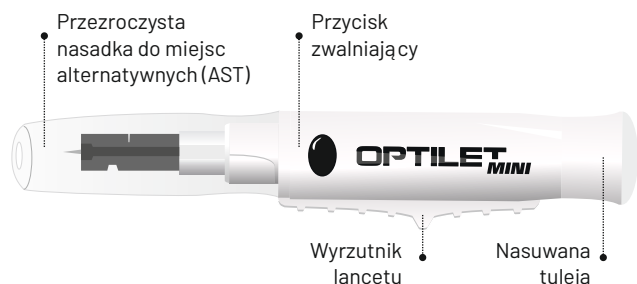

**WAŻNE:** Jeżeli rozważasz wykorzystanie innego miejsca nakłucia, niż opuszcza palca, **skonsultuj się z lekarzem.** Przezroczysta nasadka do nakłuwania w miejscach alternatywnych (przedramię lub dłoń) jest przeznaczona do użytku z nakłuwaczem Optilet Mini, w celu pobrania próbki krwi do pomiaru stężenia glukozy.

**Do użytku wyłącznie przez jednego pacjenta.**

Zapoznaj się z instrukcją użycia glukometru odnośnie pobierania próbki krwi z miejsc alternatywnych.

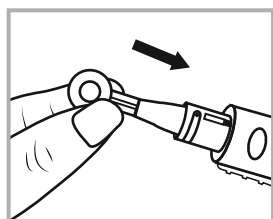

**1. Umieść lancet**  
Umieść lancet w nośniku lancetu; wciśnij do samego końca wewnątrz urządzenia.


## CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA NAKŁUWACZA

W celu oczyszczenia nakłuwacza wytrzyj elementy miękką szmatką zwilżoną wodą i łagodnym detergentem. Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie. W celu dezynfekcji elementów przygotuj roztwór wybielacza domowego i wody w proporcji 1:9. Wytrzyj urządzenie miękką szmatką zwilżoną w tym roztworze. Zanurz tylko nasadkę w tym roztworze na 30 minut. Po dezynfekcji wypłucz i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

### FUNKCJA DOKŁADNEGO CZYSZCZENIA

Jeżeli krew dostanie się do wnętrza nasadki nakłuwacza obróć przezroczystą końcówkę nakłuwacza do ustawienia "↑" (Rys. A); Wyciągnij przezroczystą końcówkę nakłuwacza (Rys. B) i wytrzyj przy pomocy miękkiej ściereki zwilżonej powyższym roztworem do dezynfekcji (Rys. C).

**PAMIĘTAJ:** Zakładając z powrotem przezroczystą końcówkę nakłuwacza sprawdź, czy wskaźnik głębokości jest ustawiony na pozycję "↑" (Rys. A), a następnie ustaw odpowiednią dla siebie głębokość nakłucia.

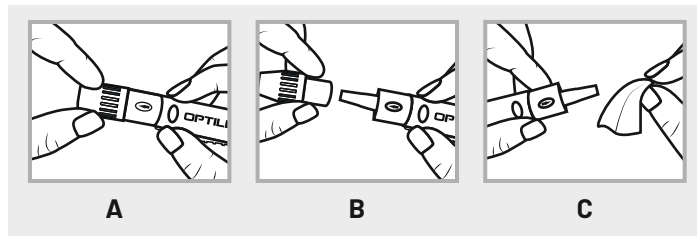

	Data ważności		Zapoznaj się z instrukcją użycia		Data produkcji
	Wytwórca		Do jednorazowego użytku	<b>LOT</b>	Numer partii
	Wyrób sterylny	Rev.	Data ostatniej aktualizacji		Ostrzeżenie
	Numer katalogowy		Nie przeznaczony do resterylizacji		Ilość sztuk w zestawie
	Nie używać przy uszkodzonym opakowaniu				

Diagnosis S.A.  
ul. Gen. W. Andersa 38A  
15-113 Białystok, Polska  
BEZPŁATNA INFOLINIA  
800 70 30 11  
(pn.-pt. w godz. 8-16)  
www.diagnosis.pl

**Oznaczenia dla OPTILET mini**

REF 5221

**Oznaczenia dla OPTILETS**

0197