

W przypadku wątpliwości zadzwoń
Bezpłatna infolinia: 800 70 30 11
w godz. 8-16 (poniedziałek-piątek)

Przechowywać w temperaturze pokojowej: 15-30°C
Chronić przed światłem słonecznym
Przechowywać z dala od dzieci
Nie nadaje się do stosowania bezpośrednio na ciało
Nie połykać



NUMER PARTII I DATA WAŻNOŚCI NA OPAKOWANIU I ETYKIECIE

Diagnosis S.A.
ul. Gen W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

Rev. 2016.06.24 /TB/

INTERPRETACJA WYNIKÓW

WYNIK POZYTYWNY - w polu testowym bibułki pojawi się kolor niebiesko-zielony. Test wykrył krew w kale. Jednakże pozytywny wynik testu nie zawsze musi oznaczać problemy jelitowe, gdyż jak wspomniano wcześniej, niektóre leki lub środki farmakologiczne mogą fałszować wynik.

WYNIK NEGATYWNY - brak zabarwienia bibułki wskazuje, że w momencie przeprowadzania testu w kale nie było wykrywalnej krwi. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach krwawienie może pojawiać się co jakiś czas. Jeśli wynik przeprowadzonego testu okazał się negatywny, natomiast zauważasz niepokojące, powtarzające się objawy tj. nagłe trzcienie na wadze, biegunka lub obstrukcja trwające dłużej niż dwa tygodnie, widoczne ślady krwi w kale, czarny stolec, skonsultuj się z lekarzem.

Test HemoActive nie zastępuje porady lekarskiej i regularnych badań lekarskich. Może on wskazać potrzebę przeprowadzenia badań specjalistycznych jelita grubego i odbytu metodą endoskopową jak również badań ogólnych.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Dlaczego należy badać wodę w muszli klozetowej?

W niektórych regionach i w pewnych okolicznościach woda może zawierać substancje, które mogą zakłócić test pokazując wynik fałszywie pozytywny.

2. Co należy zrobić, gdy w wyniku sprawdzenia toalety bibułka zabarwi się na kolor niebiesko-zielony?

Odczekaj 3 dni. Przygotuj muszlę klozetową jak opisano w pkt.1 „Test wody w muszli klozetowej” (str.3). Następnie wykonaj test zgodnie z opisaną wcześniej procedurą, omijając punkt 3 „Przeprowadzenie testu kontrolnego” (str.4), gdyż masz już jedną bibułkę testową mniej.

5

Jeśli w wyniku ponownego testu wody w muszli klozetowej otrzymany wynik będzie pozytywny, woda w muszli klozetowej nie nadaje się do przeprowadzenia testu.

3. Po wykonaniu pkt. 3 „Test kontrolny” bibułka testowa zabarwiła się na kolor pomarańczowy zamiast na niebiesko-zielony. Co to oznacza?

Proszek kontrolny wrzucony na powierzchnię wody nie rozpuścił się do końca i wszedł w reakcję z bibułką testową, co objawia się zabarwieniem bibułki w kolorze pomarańczowym lub rdzawym. W takim przypadku wynik testu jest pozytywny.

4. Jeśli po przeprowadzonym teście na bibułce pojawi się ledwo widzialny kolor niebiesko-zielony, czy wynik testu jest pozytywny?

Tak. Najmniejsze ślady zabarwienia bibułki wskazują na pozytywny wynik testu.

	Temperatura przechowywania		Przeczytaj instrukcję
	Numer partii		Do jednorazowego użytku
	Data ważności		Do diagnostyki in vitro Tylko do użytku zewnętrznego
	Wytwórca		Numer katalogowy
	Ilość testów w zestawie		Data ostatniej aktualizacji
	Nie używać przy uszkodzonym opakowaniu zawierającym bibułki testowe		Chronić przed światłem słonecznym
	Chronić przed wilgocią		

6

DOMOWY TEST DO WYKRYWANIA
KRWI UTAJONEJ W KALE

HemoActive

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed przeprowadzeniem testu
należy uważnie przeczytać instrukcję użycia.

Wyrób do diagnostyki in vitro.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Wyrób do samokontroli.


DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZIĆ TEST NA KREW UTAJONĄ W KALE?

Choroby układu pokarmowego, żołądka, jelit tj. (nowotwory, polipy, wrzody) we wczesnym etapie mogą przebiegać bezobjawowo. Test HemoActive wykrywa krew utajoną w kale, wcześniej ostrzegając o problemach jelitowych i żołądkowych wymagających opieki medycznej (specjalistycznych badań medycznych). Zasada działania testu opiera się na wykrywaniu hemoglobiny w ilości 2mg hemoglobiny / 100 ml wody.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zestaw zawiera 5 bibulek testowych w szczelnym opakowaniu, proszek kontrolny w foliowym opakowaniu oraz instrukcję użycia i Kartę Wyników.

Uwaga: Wewnątrz opakowania znajduje się saszetka pochłaniająca wilgoć, którą należy wyrzucić.

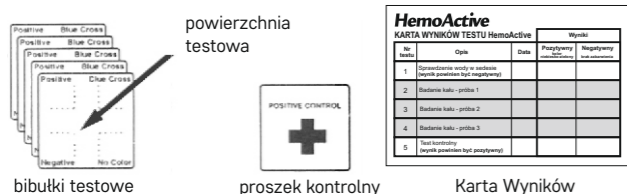

OSTRZEŻENIE: unikać zanieczyszczenia skóry i oczu zawartości saszetki z proszkiem kontrolnym. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą lub oczami przemyć dużą ilością wody. Nie wdychać zawartości saszetki, chemikalia mogą spowodować podrażnienia.

1

LEKARSTWA I DIETA

Dwa dni przed oraz w trakcie przeprowadzania testu zaleca się unikać stosowania leków zawierających kwas acetylosalicylowy, leków przeciwzapalnych, maści odbytniczych. Jeżeli jesteś w trakcie leczenia i przyjmujesz lekarstwa w tym również leki na receptę zawierające żelazo, przed przeprowadzeniem testu skonsultuj się z lekarzem.

Test nie wymaga stosowania żadnej restrykcyjnej diety. Można jeść zarówno średnio wysmażone mięso jak i witaminę C. Jednakże dwa dni przed oraz w trakcie przeprowadzania testu wskazane jest spożywanie produktów zawierających błonnik tj. warzywa, owoce oraz produkty zbożowe. Błonnik ułatwia trawienie i reguluje przemianę materii.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Testu nie należy przeprowadzać podczas menstruacji, krwawienia hemoroidów oraz obstrukcji
- Niewykorzystane bibułki testowe należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej z dala od słońca oraz wilgoci.
- Nie spożywać i nie wdychać proszku kontrolnego.
- Przechowywać z dala od dzieci.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

ETAPY PRZEPROWADZANIA TESTU HEMOACTIVE

1. Test wody w muszli klozetowej (przed pierwszym badaniem kału).
2. Badanie kału (aby wynik testu był wiarygodny w ciągu kilku dni należy wykonać 3 testy)
3. Przeprowadzenie testu kontrolnego (tylko raz, po wykonaniu ostatniego testu)


2

PRZEPROWADZENIE TESTU

1. Test wody w muszli klozetowej:

Zanim przystąpisz do przeprowadzenia testu wody dokładnie umyj muszlę klozetową w celu usunięcia wszelkich chemikaliów oraz środków czyszczących. Następnie kilkakrotnie spłucz toaletę wodą.

- Otwórz opakowanie z bibułkami testowymi odcinając brzeg wzdłuż przerywanej linii.
- Wyjmij jedną bibułkę. Wrzuć ją do muszli klozetowej i odczekaj 2 minuty.

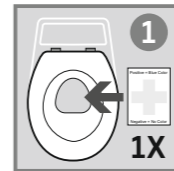


- Jeśli woda w muszli klozetowej jest czysta, bibułka nie zabarwi się.
- Jeśli w polu testowym bibułki pojawi się niebiesko-zielony krzyżyk test należy wykonać ponownie po 3 dniach opuszczając pkt.3. "Przeprowadzenie testu kontrolnego".
- Spłucz toaletę

UWAGA: Jeżeli masz problemy ze wzrokiem poproś kogoś by pomógł Ci odczytać wynik testu.

2. Badanie kału:

a) Podczas przeprowadzania testu nie należy oddawać moczu ze względu na możliwość występowania krwimoczu, krwawień hemoroidów co może spowodować zafałszowanie wyniku.

b) Oddaj stolec. Nie spuszczać wody w muszli klozetowej. Wrzuć do muszli jedną bibułkę testową (bibułka nie musi stykać się z kałem). Pozostałe bibułki zabezpiecz przed wilgocią zamykając szczelnie oryginalne opakowanie.

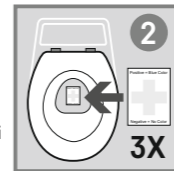

3

c) Jeżeli po 2 min. bibułka zabarwi się na kolor niebiesko-zielony oznacza to, że wynik testu jest pozytywny (obecna krew w kale), jeżeli bibułka nie zabarwi się oznacza to że wynik testu jest negatywny (brak krwi w kale).

d) Spłucz toaletę razem z bibułką testową.

e) W Karcie Wyników w odpowiedniej rubryce zaznacz "X" w zależności od wyniku badania.


f) W ciągu następnych kilku dni należy przeprowadzić test dwukrotnie powtarzając kroki od a do e. Odnotuj wyniki w Karcie Wyników.

3. Przeprowadzenie testu kontrolnego:

WAŻNE! W celu otrzymania poprawnego wyniku należy wykonać niniejszy krok.

Po przeprowadzeniu ostatniej trzeciej próby testowej kału należy przeprowadzić **test kontrolny**.

- Dokładnie spłucz toaletę.
- Ostrożnie otwórz saszetkę z proszkiem kontrolnym (mała plastikowa torebka) po czym wysyp jej zawartość do muszli klozetowej.
- Odczekaj 1 minutę, aż proszek się rozpuści. Wrzuć do muszli ostatnią bibułkę. W ciągu 2 minut na bibułce testowej powinien pojawić się niebiesko-zielony krzyżyk, (wynik testu kontrolnego powinien być pozytywny) informujący, że testy działały prawidłowo.
- Umyj ręce i zapisz wyniki w Karcie.

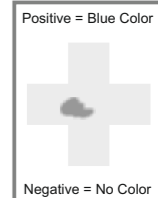

4