

NarkoDiag **Marihuana** Test

Szybki test paskowy do jakościowego wykrywania
THC w moczu po użyciu marihuany, haszyszu.

Wyrób do diagnostyki in vitro.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Wyrób do samokontroli.

Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych
działań o charakterze medycznym bez uprzedniej
konsultacji z lekarzem.

**PRZED ZASTOSOWANIEM DOKŁADNIE PRZECZYTAJ
INSTRUKCJĘ UŻYCIA**

INSTRUKCJA UŻYCIA

ZASTOSOWANIE

Szybki test paskowy NarkoDiag Marihuana-Test jest testem przeznaczonym do jakościowego wykrywania THC w moczu występującym w stężeniu granicznym 50 ng/ml.

CHARAKTERYSTYKA

Tetrahydrokannabinol (THC), jest głównym metabolitem marihuany i haszyszu wykrywanym w moczu wkrótce po zażyciu tych narkotyków. Najczęstszym sposobem zażywania marihuany, haszyszu oraz ziela konopii jest palenie. W zależności od warunków konopie mogą działać jako środek pobudzający, uspokajający, znieczulający lub lekko halucynogeny. Mimo nadawania preparatom konopi właściwości halucynogennych, symptomy używania bardziej zbliżone są do obserwowanych po alkoholu niż po halucynogenach. Efekty po zażyciu narkotyku są widoczne już po 20-30 minutach. Obecność metabolitu marihuany (THC) jest wykrywana w moczu w ciągu godziny i przez 3 do 10 dni po zażyciu narkotyku.

ZASADA DZIAŁANIA

NarkoDiag Marihuana Test jest bardzo prostym w wykonaniu testem. Zasada działania polega na zanurzeniu paska testowego w próbce moczu i odczytaniu po 5 minutach wyniku. Łatwy w interpretacji wynik widoczny jest jako barwne linie na pasku testowym.

OSTRZEŻENIA

- Uważnie przeczytaj instrukcję użycia. Jeżeli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń pod numer +48 (85) 7324 622 lub +48 (85) 7324 099 w godz. 8-16 (pn-pt).
- Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
- Test należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temp. pokojowej albo w lodówce. Zakres temp. przechowywania testu od 2°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.
- Test należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Test powinien pozostać w oryginalnym opakowaniu aż do momentu użycia.
- Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak, jak z odpadkami komunalnymi.
- Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- * Pasek testowy
- * Instrukcja użycia

Do wykonania badania potrzebne będą:

* Zegar z sekundnikiem

* Pojemnik na mocz

INSTRUKCJA UŻYCIA TESTU

PRÓBKĄ MOCZU


Próbka moczu musi być pobrana do czystego i suchego pojemnika. Do przeprowadzenia testu można użyć próbki moczu pobranej o każdej porze dnia.

PRZECHOWYWANIE PRÓBKII

Próbka moczu może być przechowywana w temp. od 2-8°C do 48 godzin przed badaniem. W celu przedłużonego przechowywania próbka może być zamrożona i przechowywana poniżej -20°C. Zamrożona próbka powinna być odmrożona i wymieszana przed wykonaniem testem.

- Przed wykonaniem testu doprowadź torebkę foliową z paskiem testowym oraz próbkę moczu do temperatury pokojowej (15-30°C). Wyjmij pasek testowy ze szczelnie zamkniętej torebki i wykorzystaj go jak najszybciej do badania.
- Zanurz pasek pionowo w próbce z moczem na 10-15 sekund. Zanurz pasek zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na pasku testowym (do wysokości linii falistych oznaczonych na pasku testowym MAX) w próbce moczu. Nie przekraczaj linii strzałek (MAX). Zobacz rysunek poniżej.
- Położ pasek testowy na niechlonej, płaskiej powierzchni, włącz zegar i poczekaj na pojawienie się kolorowych linii.
- Odczytaj wynik po 5 minutach.

UWAGA: Nie należy odczytywać wyniku po 10 minutach, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić obraz przeprowadzonego testu.

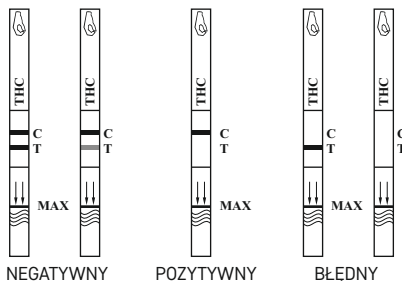

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Porównaj otrzymany wynik z powyższymi rysunkami.

WYNIK NEGATYWNY:

Wynik uznajemy za negatywny jeśli:

- pojawili się dwie linie: jedna w obszarze kontrolnym C i jedna w obszarze testowym T.

Wskazuje to, że stężenie narkotyku w próbce moczu jest niższe od wyznaczonego poziomu granicznego (poniżej 50 ng/ml) dla THC.

UWAGA: Odcień koloru w obszarze testowym T może się różnić, ale wynik powinien być uznany za negatywny nawet jak linia jest błada.

WYNIK POZYTYWNY: NARKOTYK WYKRYTY W MOCZU

Wynik uznajemy za pozytywny jeśli:

- pojawiała się jedna linia w obszarze kontrolnym C.

Oznacza to, że stężenie THC w próbce moczu przekracza wyznaczony poziom graniczny (50ng/ml).

WYNIK BŁĘDNY:

Wynik uznajemy za nieważny jeśli:

- nie pojawiła się żadna linia w obszarze kontrolnym C i testowym T
- pojawiła się jedna linia w obszarze testowym T

Test należy powtórzyć przy użyciu nowego zestawu testowego. Najbardziej prawdopodobne przyczyny braku linii kontrolnej to niewystarczająca objętość próbki moczu lub błędy w technice przeprowadzenia testu. Jeśli problem się powtarza, należy zaprzestać używania zestawu i skontaktować się z producentem.

UWAGI

- Negatywny wynik nie musi koniecznie oznaczać, że w moczu nie znajdują się narkotyki. Negatywny wynik uzyskuje się gdy narkotyk jest obecny, ale jego poziom nie przekracza poziomu granicznego testu. W próbce może być obecny narkotyk o stężeniu poniżej progu czułości testu.
- Środki rozcieńczające, dodatki fałszerskie, niektóre substancje chemiczne takie jak wybielacz i/lub atun mogą dać błędne wyniki. Jeżeli podejrzewa się użycie tych środków, test powinien zostać powtórzony wykorzystując inną próbkę moczu.
- Wynik pozytywny oznacza obecność narkotyku lub jego metabolitów, ale nie wskazuje na poziom odurzenia narkotykiem, drogę jego podania ani na jego stężenie w moczu.
- Test nie odróżnia narkotyków od pewnych leków.
- Możliwe jest, że błędy techniczne lub proceduralne, jak również inne substancje zakłócające obecne w próbce moczu mogą powodować błędne wyniki.
- Jeśli uzyskałeś wynik pozytywny testu zadbaj o osobę, którą poddałeś badaniu polecając ją opiece terapeuty lub zgłoś do specjalistycznych ośrodków pomocy osobom uzależnionym.

	Temperatura przechowywania		Przeczytaj instrukcję
	Numer partii		Do jednorazowego użytku
	Data ważności		Wyrób do diagnostyki in vitro Tylko do użytku zewnętrznego
	Wytwórca		Numer katalogowy
	Data ostatniej aktualizacji		Ilość testów w zestawie
	Nie używać przy uszkodzonym opakowaniu		Chronić przed wilgocią
	Chronić przed światłem słonecznym		

Przechowywać w temp. 2-30°C
Numer partii i data ważności
na opakowaniu

Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
BEZPŁATNA INFOLINIA:
800 70 30 11
www.diagnosis.pl