


FAMILY

INHALATOR KOMPRESOROWO TŁOKOWY

Instrukcja użycia

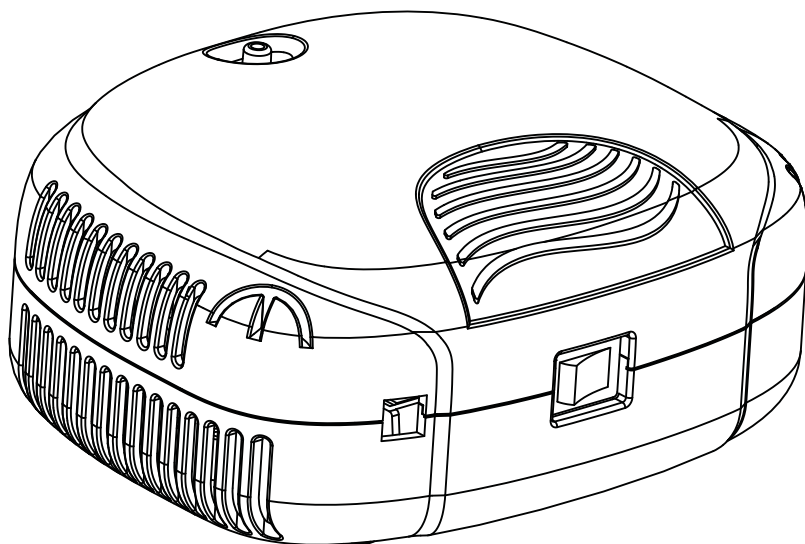

 Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

SERWIS GŁÓWNY
Diagnosis S.A.
ul. Przemysłowa 8, 16-010 Wasilków
tel. 85 874 60 45
serwis@diagnosis.pl

REF 7026

CE 0197

Rev. 2018.10.30

1. PRZEZNACZENIE

Điękujemy za zakup inhalatora Dr Check FAMILY przeznaczonego do inhalacji. Leczenie inhalacyjne to skuteczna i bezpieczna metoda leczenia chorób dróg oddechowych. Rozpoczęcie leczenia należy podjąć po konsultacji z lekarzem.

Inhalator Dr Check FAMILY to kompaktowe urządzenie medyczne przeznaczone do pracy przerywanej (30 min. pracy, 30 min. przerwy). Umożliwia natychmiastowe i bezpośrednie dotarcie preparatu medycznego w formie wziewnej do oskrzeli i płuc. Jeřli zostaną zachowane odpowiednie środki ostroŹności, inhalator zapewni stosowną jakořć leczenia przez szereg lat.




Przed pierwszym uŹyciem inhalatora uważnie przeczytaj instrukcję uŹycia.

2. ZASADA DZIAŁANIA

Inhalator Dr Check FAMILY został opracowany do leczenia astmy, alergii i innych chorób układu oddechowego. Urządzenie wytwarza strumień powietrza prowadzony przez przewód powietrza do nebulizatora. Po wprowadzeniu powietrza do nebulizatora, preparat medyczny zostanie rozpylony, tworząc łatwą do inhalacji mgiełkę. Główny przepływ powietrza do i z kompresora jest przedstawiony na rysunku 1.

Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji uŹycia w celu zapoznania się z charakterystyką produktu. Wyrób należy stosować wyłącznie z jego przeznaczeniem.

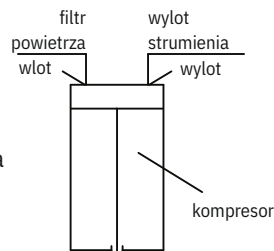

Rys.1

3. CECHY PRODUKTU

Przed uŹyciem urządzenia upewnij się, czy w zestawie znajdują się następujące elementy:

- 1x urządzenie główne (kompresor)
- 1x nebulizator
- 1x przewód powietrza
- 1x maska dla dorosłych, maska dla dzieci
- 1x ustnik
- 5x filtr powietrza

Urządzenie główne (kompresor)

Wejście na przewód powietrza

Otworki wentylacyjne

Przewód zasilający

Przełącznik zasilania

Rys.2



Ustnik



Nebulizator



Maska dla dorosłych



Maska dla dzieci

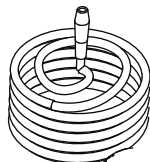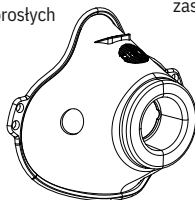


Przewód powietrza



Filtr powietrza

Urządzenie główne (widok od spodu)

Filtr i pokrywa filtra

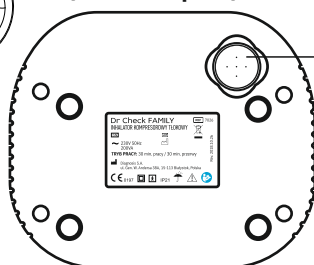

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



WAŻNE OSTRZEŻENIA: Niezastosowanie się do ostrzeżeń i treści niniejszej instrukcji może narazić użytkownika na takie ryzyko jak: pogorszenie stanu zdrowia, oparzenia, porażenie prądem, nawracające infekcje, śmierć, pożar, zanieczyszczenie środowiska. Stosowanie jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego wymaga zachowania następujących podstawowych zasad:

⚠ OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Stosuj urządzenie wyłącznie do przewidzianego użytku (inhalacje aerozoli) i w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
2. W kwestiach dotyczących rodzaju, dawki i schematu stosowania leku należy stosować się do zaleceń lekarza lub osoby zajmującej się leczeniem chorób układu oddechowego. Intensywność stosowania urządzenia musi być zawsze konsultowana z lekarzem.
3. Inhalacje wszelkich substancji powinny być wykonywane za zgodą lekarza, który decyduje w sprawie dawek i sposobu użycia.
4. Jeżeli podczas stosowania występują niepokojące objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
5. Brak energii elektrycznej, nagła awaria lub inne niekorzystne warunki mogą spowodować nieprawidłowe działanie; z tego względu zaleca się zaopatrzenie w urządzenie lub lek (zgodnie z zaleceniami lekarza), który mógłby być stosowany zamiennie.
6. Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych; przechowywać je w warunkach pokojowych.
7. Nie należy przechowywać urządzenia w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach. Należy je chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
8. Aby uniknąć zakażenia urządzenie przechowuj zawsze w czystym miejscu. Nie używaj urządzenia, jeżeli było przechowywane w zanieczyszczonym miejscu.
9. Przewód zasilający oraz przewód powietrza mogą stanowić ryzyko uduszenia z powodu ich długości.
10. Nie używaj urządzenia w pobliżu obiektów łatwopalnych lub materiałów wybuchowych.
11. Nie używaj urządzenia w otoczeniu, w którym niedawno używano sprayów; w takim przypadku należy przewietrzyć pomieszczenie przed rozpoczęciem terapii.
12. Urządzenia nie wolno przechowywać ani używać w miejscu, w którym mogłoby być narażone na działanie szkodliwych oparów lub substancji lotnych.
13. Nie blokuj ani nie zatykaj wlotów powietrza urządzenia, nie stawiaj go na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko lub tapczan. W trakcie używania nie przykrywaj kompresora kocem, ręcznikiem ani innymi przykryciami.
14. Nie wkładaj żadnego przedmiotu do otworów do chłodzenia.
15. Nie używaj urządzenia, jeżeli wydaje ono nieprawidłowe dźwięki.
16. Po użyciu należy zawsze usunąć wszelkie pozostałości leku i za każdym razem zastosować świeżo przygotowany lek.
17. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów nieprzytomnych ani bez spontanicznej czynności oddechowej. Urządzenie nie jest przeznaczone do znieczulania ani wentylowania płuc.

⚠ ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM:

1. Przestrzegaj specyfikacji elektrycznych podanych na urządzeniu.
2. Nie używaj urządzenia, jeżeli wtyczka lub kabel zasilający są uszkodzone.
3. Trzymaj urządzenie z dala od wody. Nie używaj urządzenia mając mokre lub wilgotne ręce,
4. Urządzenia nie należy używać podczas kąpieli.
5. Sprężarka i przewód zasilający nie są wodoodporne. Jeśli ciecz wyleje na te części, natychmiast odłącz przewód zasilający i zetrzyj płyn gazą lub innym miękkim materiałem chłonnym.
6. Nie dopuszczaj nigdy do zanurzenia urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych cieczach; nie używaj urządzenia jeżeli zostało przypadkowo zamoczone. W takim przypadku urządzenie należy przesłać do serwisu z opisem zaistniałej sytuacji do badania i naprawy.
7. Nigdy nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody - natychmiast odłącz wtyczkę zasilającą.
8. Nie ciągnij za kabel zasilający lub samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
9. Urządzenia nie wolno używać ani przechowywać w wilgotnych miejscach.
10. Urządzenie i kabel zasilający powinny się znajdować z dala od źródeł ciepła.
11. Nie należy używać przedłużaczy. Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka elektrycznego
12. Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego przed czyszczeniem, napełnianiem lekarstwem i po każdym użyciu.

⚠ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYWANIA AKCESORIÓW

1. Należy wyczyścić wszystkie akcesoria przed pierwszym zastosowaniem po zakupie lub jeżeli urządzenie nie było używane dłuższy czas.
2. Aby nie dopuścić do pogorszenia funkcjonalności urządzenia, używaj tylko oryginalnych akcesoriów dostarczanych przez Producenta zgodnie z instrukcją użycia tego urządzenia.
2. Akcesoria powinny być używane tylko przez jedną osobę. W przypadku używania inhalatora przez innych członków rodziny zalecamy czyszczenie akcesoriów przed każdym użyciem lub zakup dodatkowych akcesoriów tylko do indywidualnego użytku.
3. Nie używaj urządzenia w połączeniu z innymi akcesoriami niż te, które są opisane w instrukcji.
4. Nie należy używać uszkodzonego zestawu nebulizatora, ustnika ani masek.
5. Nie wolno używać ani przechowywać urządzenia ze zgłębionym przewodem powietrza.
6. Do zbiornika na lek nie należy wlewać więcej niż 8 ml leku.

PRZECHOWYWANIE



1. Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla pozbawionych dozoru niemowląt i dzieci osób do tego nie powołanych a także zwierząt domowych. Urządzenie zawiera niewielkie elementy, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia.
2. W przypadku stosowania urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu należy zapewnić ścisły nadzór.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W kwestiach bezpieczeństwa, skuteczności i niezawodności odpowiedzialność spoczywa na wytwórcy tylko jeżeli:

- montaż, kalibracja, naprawy lub modyfikacje są przeprowadzane przez osoby do tego uprawnione;
- instalacja elektryczna jest zgodna z obowiązującymi normami;
- przestrzegano instrukcji użytkowania. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, błędne lub nieracjonalne używanie urządzenia.

BEZPIECZNIK

Wewnątrz urządzenia znajduje się bezpiecznik, który w przypadku awarii należy wymienić. Operacja wymiany, tak jak wszystkie inne ewentualne naprawy, powinna zostać przeprowadzona przez wytwórcę lub personel autoryzowany przez niego.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Urządzenie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i nadaje się do użytku we wszystkich budynkach, wliczając w to budynki mieszkalne. Poziom emisji częstotliwości radiowych urządzenia jest bardzo niski i najprawdopodobniej nie wywołuje interferencji z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu. Zaleca się jednak nie umieszczanie go na innych urządzeniach lub w ich pobliżu. Jeżeli powstają interferencje z innymi urządzeniami elektrycznymi, urządzenie należy od nich oddalić lub podłączyć je do innego gniazdka. Urządzenia do komunikacji radiowej mogą mieć wpływ na funkcjonowanie urządzenia. Trzymaj je w odległości co najmniej 3 m od urządzenia.

4. SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE DO NEBULIZACJI

Aby wlać lek do nebulizatora, wykonaj następujące czynności:


1. Otwórz pojemnik na lek.
2. Napętnij pojemnik na lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Dopuszczalna objętość leku wynosi minimum 2 ml a maksymalnie 8 ml.
3. Zamknij pojemnik na lek.
4. Podłącz ustnik lub maskę.

UWAGA: Ustnik jest przeznaczony do stosowania doustnego wziewnego.

UWAGA: Pamiętaj o konieczności używania rozpylacza w nebulizatorze (w pojemniku na lek).

Niezbędne to jest do prawidłowej pracy nebulizatora.

BUDOWA NEBULIZATORA

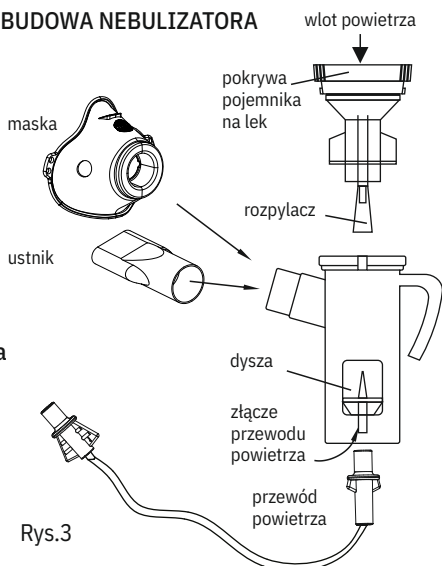

Rys.3

INHALACJA

Aby uruchomić inhalator, wykonaj następujące czynności:

- Podłącz do prądu wtyczkę kompresora, ale nie podłączaj nebulizatora.
- Upewnij się, że filtr powietrza jest czysty i znajduje się w kompresorze.
- Podłącz nebulizator przy pomocy przewodu powietrza z kompresorem.
- Włącz zasilanie.
- Po uruchomieniu kompresora zostanie rozpoczęta nebulizacja i wytwarzanie aerozolu.
- Rozpocznij inhalację zgodnie z zaleceniami lekarza. Podczas inhalacji spokojnie wykonuj wdechy i wydechy. Należy wygodnie usiąść oraz całkowicie rozluźnić mięśnie, utrzymując górną część ciała w pozycji wyprostowanej.
- Nie należy leżeć podczas inhalacji.
- Inhalator pracuje w trybie: 30 min. pracy / 30 min. przerwy. Po 30 min. pracy należy wyłączyć urządzenie, aby nie dopuścić do przegrzania kompresora.
- Inhalacja jest zakończona w momencie, gdy w pojemniku na lek nie będzie już lekarstwa.
- Po zakończeniu inhalacji wyłącz zasilanie i odłącz kompresor od gniazda sieciowego, odłącz pozostałe elementy.

6. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Wszystkie czynności związane z czyszczeniem urządzenia powinny być przeprowadzane przy odłączonym urządzeniu od gniazdka sieciowego. Aby uniknąć niepoprawnego funkcjonowania urządzenia oraz inhalacji niepożądanych substancji, wyczyść urządzenie i akcesoria natychmiast po zakończeniu terapii.
2. Czyszczenie urządzenia powinno być wykonywane przy użyciu szmatki lekko zwilżonej alkoholem. Po wyczyszczeniu urządzenia, przed jego użyciem zaczekaj, aby alkohol całkowicie wyparował.
3. Nie używaj innych cieczy ani innych substancji czyszczących. Nie używaj zbyt mokrych szmatek, ponieważ kontakt cieczy z elementami elektrycznymi urządzenia może spowodować jego błędne funkcjonowanie, nieodwracalne uszkodzenia, jak również może to być niebezpieczne dla zdrowia.

7. CZYSZCZENIE AKCESORIÓW

1. Przed pierwszym użyciem i każdorazowo po użyciu wymyj dokładnie akcesoria (z wyjątkiem przewodu powietrza) letnią wodą i osusz je szmatką.
2. Następnie należy je odłożyć w czyste miejsce. Przy czyszczeniu upewnij się, że zostały usunięte wszelkie pozostałości substancji przeznaczonej do inhalacji a następnie dokładnie osusz akcesoria.
3. W żadnym wypadku nie używaj środków do czyszczenia i dezynfekcji, które mogą działać toksycznie przy kontakcie ze skórą lub śluzówkami, przy połknięciu lub przy wdychaniu.
4. Jeżeli przewód powietrza jest brudny, należy go wymienić. W przypadku utracenia szczelności przewodu powietrza należy go wymienić niezwłocznie na nowy.
5. Aby nebulizator działał prawidłowo, po każdym użyciu, wykonaj następujące czynności:
 - Po odłączeniu przewodu powietrza odłącz ustnik lub maskę.
 - Otwórz pokrywę pojemnika na lek i opróżnij pojemnik na lek. Umyj nebulizator pod bieżącą wodą lub pozostaw go w ciepłej wodzie przez 15 minut. Dla uzyskania lepszego efektu czyszczenia, dodaj trochę octu do wody (mieszanka 1/3 octu, 2/3 wody).
6. **Usuwanie skroplonej cieczy z przewodu powietrza.** Ewentualną wilgoć lub płyn pozostały w przewodzie powietrza usuń, uruchamiając kompresor na kilka minut bez podłączonego nebulizatora.

UWAGA: Nie należy gotować akcesoriów, może to spowodować ich uszkodzenie.

- Nie wkładaj akcesoriów inhalatora do zmywarki.
- Przed dłuższym przechowywaniem akcesoria inhalatora należy całkowicie osuszyć.

8. WYMIANA FILTRA

Jeżeli filtr powierza zmienił barwę na szarą, uległ zanieczyszczeniu albo był używany przez 3 miesiące lub 300 razy należy wymienić go na nowy.

Aby wymienić filtr powietrza wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij pokrywę filtra.
2. Wymień filtr.
3. Zamontuj z powrotem pokrywę filtra.

UWAGA: Należy wyłącznie używać filtrów powietrza dostarczonych przez wytwórcę. Nie wolno używać wyrobu bez filtra. Nie wolno myć ani czyścić filtra. Jeżeli filtr zamoknie należy go wymienić. Przed włożeniem filtra powierza należy sprawdzić czy jest on czysty. Zamiast filtra nie należy używać bawełny ani innych materiałów.

8. AKCESORIA ZAMIENNE

Aby zapewnić skuteczność inhalacji, poprawne działanie i bezpieczeństwo używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów przeznaczonych do niniejszego urządzenia. Wszystkie akcesoria nadają się do bezpośredniego kontaktu ze skórą. Nie zawierają ftalanów.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z firmą Diagnosis. Bezpłatna Infolinia 800 70 30 11.

9. OKRESOWE KONTROLE

Aby zachować wysoką efektywność urządzenia, zaleca się:

- wymianę pojemnika na lek co 12 miesięcy (co 6 miesięcy jeżeli pojemnik na lek jest używany 3 razy dziennie). Uszkodzony pojemnik na lek powinien być wymieniony od razu.
- wymianę maski dla dzieci, maski dla dorosłych, ustnika oraz przewodu powietrza co 2 lata.

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Objaw	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Zbyt głośna praca	Brak filtra w urządzeniu	Umieść filtr w urządzeniu
Inhalator nie uruchamia się.	Główny wyłącznik kompresora jest wyłączony.	Włączyć urządzenie.
	Nebulizator nie został wyczyszczony po poprzednim użyciu.	Wyczyścić urządzenie.
	Przewód powietrza jest zagięty.	Usunąć wszelkie zagięcia lub supły znajdujące się na przewodzie.
	Filtr jest zatkany.	Wymienić filtr.
	Brak leku.	Dodać odpowiednią ilość leku, przepisanego przez lekarza, do pojemnika na lek.
W przewodzie powietrza formują się krople wody.	Dodano zbyt dużą ilość leku.	Dostosować ilość leku w pojemniku na lek do odpowiedniego poziomu, podłączyć przewód powietrza do kompresora i włączyć urządzenie.
	Przewód powietrza nie został wysuszony.	Wilgoć pozostałą w przewodzie powietrza można usunąć, uruchamiając urządzenie na kilka minut bez podłączonego nebulizatora. Jeżeli przewód jest brudny, należy go wymienić.


UWAGA: Jeżeli sugerowana czynność naprawcza nie rozwiązuje problemu nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia. Należy zwrócić urządzenie do punktu sprzedaży lub przestać go na adres serwisu.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	230 VA C, 50 Hz
Zużycie energii:	poniżej 47W
Przepływ nebulizatora:	3 L
Przepływ sprężarki:	6 L
Pojemność pojemnika na lek:	2-8 ml
Rozmiar cząstek:	0,4 do 7 mikrona
MMAD:	3,74 mikrona
Średnia szybkość nebulizacji:	0,41 ml/min
Ilość leku pozostająca po inhalacji:	0,98 ml
Poziom hałas:	poniżej 60 dBA
Ciśnienie sprężarki:	23 - 32 psi 160 - 220 kPa 1,6 - 2,2 bara
Zakres ciśnienia roboczego:	5 do 8 psi 30 - 55 kPa 0,3 do 0,55 barów
Warunki pracy:	10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F) wilgotność: 10% do 95% RH
Warunki przechowywania:	od -20 °C do 70 °C (-4 °F do 158 °F) wilgotności: 10% do 95% RH
Wymiar (dł x szer x wys):	166 x 143 x 80 mm
Waga produktu:	1,10 kg
Zawartość zestawu:	Kompresor, nebulizator, maska (duża), maska (mała), 5 x filtr powietrza, przewód powietrza 1,5 m., ustnik, instrukcja użycia

WYKAZ WIELKOŚCI CZĄSTECZEK ROZPYLANYCH PRZEZ INHALATOR

Dane ulegają zmianie w zależności od stosowanego leku. Pomiary wykonano z użyciem technologii MALVERN i roztworu fizjologicznego. Dostarczone dane mogą nie mieć zastosowania do leków w zawieszynie lub leków o dużej lepkości. Należy zwrócić się do producenta leku.

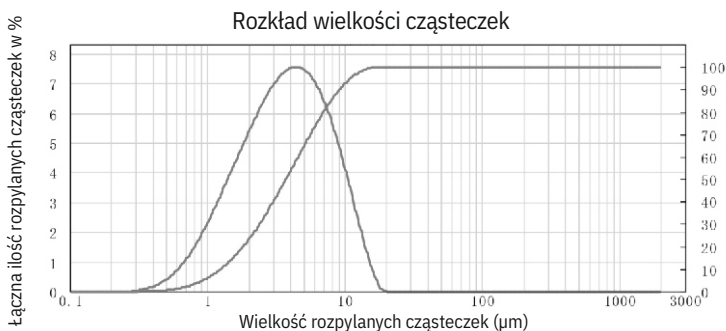

UWAGA: Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG oraz europejskiej normy EN 13544-1:2007+A1:2009 Sprzęt do terapii schorzeń dróg oddechowych – Część 1: Systemy do nebulizacji i ich części

Działanie urządzenia może różnić się w przypadku zastosowania leków w postaci zawiesziny lub odznaczających się dużą lepkością. W takich przypadkach należy informacji szukać w ulotce informacyjnej producenta leku.

12. WYJAŚNIENIE UŻYTYCH SYMBOLI

			Rev.	SN						IP21	
Ważne ostrzeżenia	Prąd zmienny	Wytwórca	Data ostatniej aktualizacji	Numer seryjny	Numer katalogowy	Rok produkcji	Izolacja klasy II	Zapoznaj się z instrukcją użycia	Chronić przed wilgocią	Stopień ochrony	Urządzenie Typ BF Część mająca kontakt z ciałem pacjenta

UWAGA!

Dane techniczne wymagane normą dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC dostępne są pod adresem: <http://diagnosis.pl/normy/drcheckfamily>



Zużyty wyrób oddać do punktu zbiórki odpadów. Zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Jeśli masz wątpliwości, gdzie oddać zużyty aparat skontaktuj się z firmą Diagnosis Bezpłatna infolinia: 800 70 30 11.



Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, Polska
Bezpłatna infolinia: 800 70 30 11
www.diagnosis.pl
diagnosis@diagnosis.pl

SERWIS GŁÓWNY DIAGNOSIS S.A.
ul. Przemysłowa 8, 16-010 Wasilków
tel. 85 874 60 45
serwis@diagnosis.pl



pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA URZĄDZENIA MODEL

NUMER SERYJNY DATA SPRZEDAŻY

WARUNKI GWARANCJI

1. Diagnosis S.A. udziela gwarancji:

- 2 lata na inhalator Dr Check FAMILY (z wyłączeniem akcesoriów)
- 12 miesięcy na akcesoria do inhalatorów

Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni.

Termin liczy się od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu.

2. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku gdy:

- naprawa nie została wykonana w terminie określonym w punkcie 1
- uprawniony punkt serwisowy stwierdził wadę fabryczną nie możliwą do usunięcia
- w okresie gwarancji wykonane zostały 4 naprawy, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzętu.

3. Gwarancją nie są objęte: baterie, wyroby z nieczytelnym lub zniszczonym numerem fabrycznym, uszkodzenia powstałe w skutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania, dostanie się do wewnątrz płynów lub ciał obcych, przepięć w sieci zasilającej, naprawy przez osoby niepowołane oraz zdarzeń losowych.
4. Wadliwy sprzęt nabywca powinien dostarczyć na adres serwisu głównego lub jednego z Autoryzowanych Punktów Serwisowych.
5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
6. Jediną podstawą uprawnień gwarancyjnych jest karta gwarancyjna z wpisaną datą sprzedaży, pieczętką i podpisem sprzedawcy. Karta nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek i wpisów przez osoby nieupoważnione, nieczytelna w skutek zniszczenia - jest nieważna.

ADNOTACJE PUNKTU SERWISOWEGO

L.p.	data zgłoszenia	data naprawy	gwarancję przedłużono do	opis czynności	pieczęć i podpis wykonawcy



Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

SERWIS GŁÓWNY
Diagnosis S.A.
ul. Przemysłowa 8, 16-010 Wasilków
tel. 85 874 60 45
serwis@diagnosis.pl