

# NAKŁUWACZ OPTILET MINI

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed przystąpieniem do pobrania próbki krwi zapoznaj się z instrukcją użycia.



Optilet Mini to bezpieczny i wygodny nakłuwacz, który służy do pobierania próbek krwi kapilarnej do badania poziomu glukozy. Dzięki regulowanej końcówce można dopasować głębokość nakłucia do większości rodzajów skóry. Przed wykonaniem nakłucia należy zawsze umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i dokładnie je wysuszyć. Urządzenie posiada 6 ustawień głębokości nakłucia (od 1 do 6), przeznaczone do różnych rodzajów skóry. Mniejsze wartości są przeznaczone do nakłuć płytszych, natomiast większe wartości są przeznaczone do nakłuć głębszych. Płytsze nakłucia są odpowiednie dla dzieci i większości dorosłych. Głębsze nakłucia sprawdzają się w przypadku osób z grubszą lub zrogowaciałą skórą. Istnieje również możliwość wykonania nakłucia w miejscach alternatywnych (poza opuszką palca), do tego służy specjalna nasadka.

### ⚠ UWAGA:

#### Do użytku wyłącznie przez jednego pacjenta

To urządzenie nie może być używane do pobierania krwi przez pracowników ochrony zdrowia w placówkach opieki, klinikach i przychodniach, ani nie może być współdzielone z innymi osobami, w tym także z członkami rodziny.

#### Nie należy ponownie używać lancetu

Lancety są wyłącznie jednorazowego użytku. Ponowne użycie lancetów może spowodować stępienie lub zgięcie końcówki lancetu, powodując uszkodzenie skóry, blizny i większy ból.

Użycie ponowne tej samej igły przez osoby trzecie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zagrożenia mikrobiologicznego, może nastąpić zakażenie m.in.: wirusem żółtaczkowy typu B, żółtaczkowy typu C oraz wirusem HIV.

#### Aby zmniejszyć ryzyko infekcji:


- Umyj miejsce nakłucia wodą i mydłem przed pobraniem próbki.
- Utrzymuj urządzenie w czystości. Produkty kosmetyczne, olejki, zanieczyszczenia, pył mogą spowodować jego nieprawidłową pracę.




- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nakłuwacz, nasadka, lancety i osłona nakłuwacza stwarzają zagrożenie uduszenia.

- **Zawsze używaj nowego, czystego lancetu. Lancety są jednorazowego użytku.**


## PRZYGOTOWANIE NAKŁUWACZA

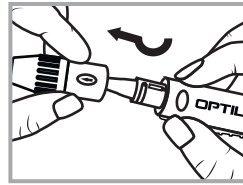


- 1. Ściągnij nasadkę nakłuwacza**  
Ostrożnie ściągnij nasadkę z nakłuwacza.

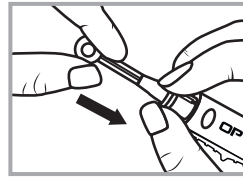


- 2. Umieść lancet**  
Umieść lancet w nośniku; wciśnij do samego końca.

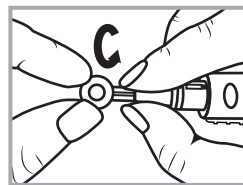


- 3. Ściągnij osłonkę ochronną lancetu**  
Skręć osłonkę ochronną lancetu, aby oddzielić ją od lancetu. Zachowaj osłonkę ochronną; będzie potrzebna podczas usuwania lancetu.

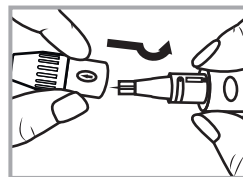

- 4. Załóż nasadkę nakłuwacza**  
Nałóż nasadkę na urządzenie i dokręć ją dobrze. Uważaj, aby nie dotknąć odsłoniętej igły lancetu.

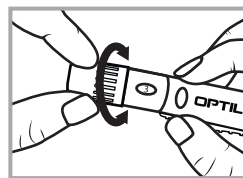


- 5. Regulacja ustawienia głębokości nakłucia**  
Wybierz pożądaną głębokość nakłucia, aby pozyskać odpowiednią próbkę krwi z jak najmniejszym dyskomfortem. Ustaw głębokość obracając końcówkę nakłuwacza. Urządzenie posiada 6 ustawień głębokości:  
1, 2 dla delikatnej skóry  
3, 4 dla normalnej skóry  
5, 6 dla grubej lub zrogowaciałej skóry

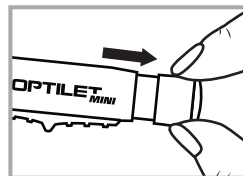


- 6. Odciągnij nasuwaną tuleję nakłuwacza**  
Odciągnij tuleję, aż usłyszysz kliknięcie.


## NAKŁUWANIE OPUSZKI PALCA

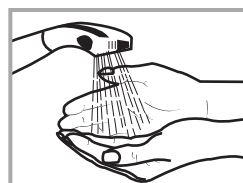


- 1. Umyj ręce**  
Przed pobraniem próbki krwi umyj ręce i miejsce nakłucia ciepłą wodą i mydłem. Dobrze wypłucz i wysusz ręce.

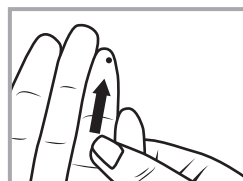

- 2. Pobierz kroplę krwi**  
Aby uzyskać wystarczającą próbkę krwi rozmasuj energicznie miejsce pobrania. Przyłóż nakłuwacz do palca, z którego ma być pobrana próbka krwi. Wciśnij przycisk zwalniający, żeby wykonać nakłucie. Odlóż nakłuwacz i postępuj dalej zgodnie z instrukcją użycia glukometru.

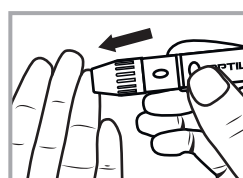


## Nakłuwanie w miejscu alternatywnym

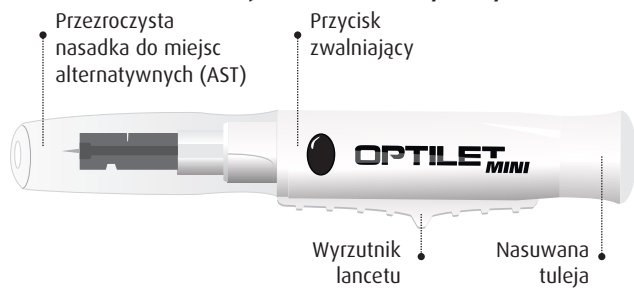

**WAŻNE:** Jeżeli rozważasz wykorzystanie innego miejsca nakłucia, niż opuszcza palca, **skonsultuj się z lekarzem.** Przezroczysta nasadka do nakłuwania w miejscach alternatywnych (przedramię lub dłoń) jest przeznaczona do użytku z nakłuwaczem Optilet Mini, w celu pobrania próbki krwi do pomiaru stężenia glukozy.


## Do użytku wyłącznie przez jednego pacjenta

Zapoznaj się z instrukcją użycia glukometru odnośnie pobierania próbki krwi z miejsc alternatywnych.

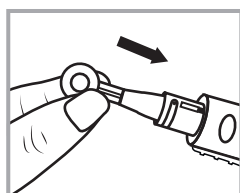


### 1. Umieść lancet

Umieść lancet w nośniku lancetu; wciśnij do samego końca wewnątrz urządzenia.

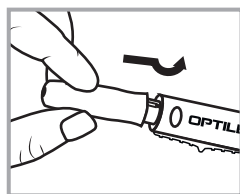


### 2. Załóż przezroczystą nasadkę (AST) dla miejsc alternatywnych.

Załącz przezroczystą nasadkę do miejsc alternatywnych (AST) zamiast nasadki nakłuwacza. W przypadku stosowania nasadki (AST) nie ma potrzeby regulacji głębokości nakłucia.

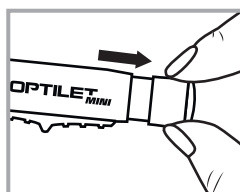


### 3. Pociągnij tuleję

Pociągnij nasuwaną tuleję do przodu, aż usłyszysz kliknięcie.

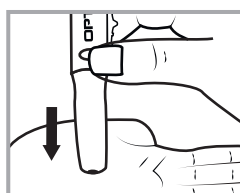

### 4. Przytrzymaj przezroczystą nasadkę na skórze.


Dociśnij stabilnie nakłuwacz i wciśnij przycisk zwalniający, aż w nasadce pojawi się wystarczająca objętość krwi.

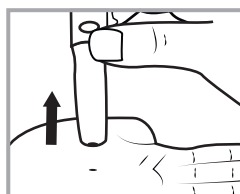

### 5. Ostrożnie unieś nakłuwacz pionowo w górę.


Uważaj, aby nie rozmazać próbki krwi w miejscu nakłucia. Nanieś kroplę krwi na pasek testowy.

## Usuwanie zużytego lancetu

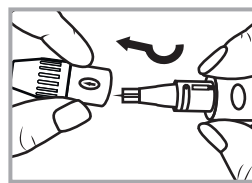


### 1. Ściągnij nasadkę nakłuwacza

Ostrożnie ściągnij nasadkę z nakłuwacza. Uważaj, aby nie dotknąć odsłoniętego lancetu.

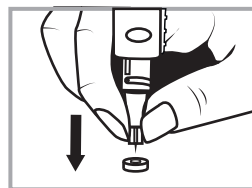


### 2. Nałóż osłonkę na lancet

Przed usunięciem lancetu połóż osłonkę ochronną lancetu na twardym podłożu, następnie ostrożnie wkluj w nią lancet.

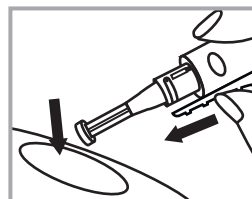

### 3. Wysuń lancet

Przesuń wyrzutnik lancetu do przodu, aż lancet wysunie się z nakłuwacza. Usuń zużyty lancet.

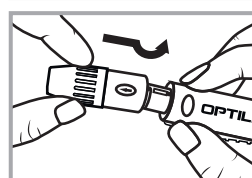

### 4. Nałóż nasadkę

Nałóż nasadkę nakłuwacza z powrotem na urządzenie.

## CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA NAKŁUWACZA


W celu oczyszczenia nakłuwacza wytrzyj elementy miękką szmatką zwilżoną wodą i łagodnym detergentem. Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie. W celu dezynfekcji elementów przygotuj roztwór wybielacza domowego i wody w proporcji 1:9. Wytrzyj urządzenie miękką szmatką zwilżoną w tym roztworze. Zanurz tylko nasadkę w tym roztworze na 30 minut. Po dezynfekcji wypłucz i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

## FUNKCJA DOKŁADNEGO CZYSZCZENIA


Jeżeli krew dostanie się do wnętrza nasadki nakłuwacza obróć przezroczystą końcówkę nakłuwacza do ustawienia "↑" (Rys. A); Wyciągnij przezroczystą końcówkę nakłuwacza (Rys. B) i wytrzyj przy pomocy miękkiej ściereki zwilżonej powyższym roztworem do dezynfekcji (Rys. C).

### PAMIĘTAJ:

Zakładając z powrotem przezroczystą końcówkę nakłuwacza sprawdź, czy wskaźnik głębokości jest ustawiony na pozycję "↑" (Rys. A), a następnie ustaw odpowiednią dla siebie głębokość nakłucia.

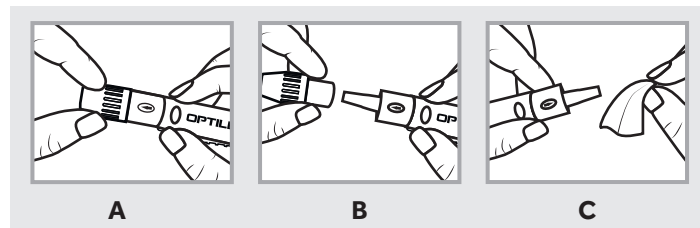

### Oznaczenia dla OPTILET mini

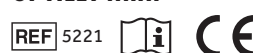

### Infolinia

CZYNNA:  
poniedziałek - piątek  
W GODZINACH:  
8.00 - 16.00

800 70 30 11  
dla telefonów stacjonarnych  
połączenie bezpłatne

### Oznaczenia dla OPTILETS



+48 85 874 69 28  
dla telefonów komórkowych  
(koszt połączenia ponosi  
dzwoniący zgodnie z taryfą  
operatora)

Diagnosis S.A.  
ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, Polska  
www.diagnosis.pl

Rev. 2021.05.12

Data ważności	Zapoznaj się z instrukcją użycia
Wytwórca	Do jednorazowego użytku
Wyrób sterylny	Rev. Data ostatniej aktualizacji
Numer katalogowy	Nie przeznaczony do resterylizacji
Data produkcji	Ostrzeżenie
Numer partii	Ilość sztuk w zestawie
Nie używać przy uszkodzonym opakowaniu	