

POZNAJ SYSTEM

ISTEL Care

KTÓRY POMAGA LEPIEJ
KONTROLOWAĆ STAN ZDROWIA



POZIOM
GLUKOZY



CIŚNIENIE
KRWI



ANALIZA
SKŁADU CIAŁA



TEMPERATURA
CIAŁA



BADANIE
EKG



www.istelcare.pl

KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE NA ZDROWIE PACJENTA



Innowacyjne rozwiązanie telemedyczne

www.istelcare.pl

Drogi Pacjencie!

Urządzenie, który trzymasz w dłoni, daje Ci możliwość kontroli Twojego stanu zdrowia bez wychodzenia z domu. Od dziś możesz udostępniać lekarzowi swoje wyniki badań i konsultować je przy pomocy videoporady.

W jaki sposób? To proste!

Wystarczy pobrać aplikację **Istel Health**, utworzyć swój profil użytkownika i rozszerzyć go o konto w **Systemie Istel Care**. Dzięki funkcji Bluetooth pomiary z urządzenia trafią bezpośrednio do aplikacji, a następnie do Systemu, który umożliwi dzielenie się wynikami z lekarzem lub opiekunem. Korzystanie z aplikacji Istel Health oraz Systemu Istel Care jest bezpłatne, więc nie zastanawiaj się dłużej – załóż konto i korzystaj ze wszystkich możliwości, jakie daje Ci posiadanie tego urządzenia. Poniżej przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces instalacji aplikacji, parowania urządzeń (glukometru, ciśnieniomierza, termometru) oraz zakładania konta w Systemie Istel Care.

Załącz konto w Systemie Istel Care, zarejestruj swoje urządzenie, a my przedłużymy gwarancję.

Oferujemy również wsparcie telefoniczne. Zadzwoń, aby uzyskać pomoc podczas zakładania konta:

tel: 885 961 858


(pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00)

Dowiedz się więcej o Systemie Istel Care: www.istelcare.pl

Tylko **4 główne kroki** dzielą Cię od korzystania z możliwości, jakie daje aplikacja Istel Health oraz konto Pacjenta w Systemie Istel Care:

I. **INSTALACJA APLIKACJI** ISTEL HEALTH ORAZ UTWORZENIE PROFILU UŻYTKOWNIKA:

1. Pobierz bezpłatną **aplikację Istel Health** ze sklepu Google Play lub AppStore.
2. Zainstaluj aplikację na swoim telefonie lub tablecie.
3. Utwórz swój **profil użytkownika** uzupełniając formularz (Rys. 1). Zatwierdź wciskając OK.

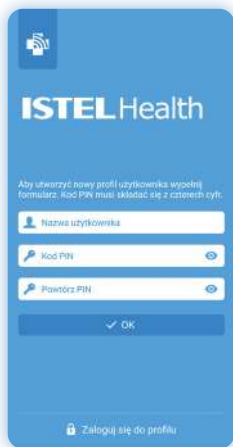

Rys. 1

UWAGA!

Zapamiętaj swój kod PIN, aby móc zalogować się na urządzeniu w przyszłości.

TU MOŻESZ WPISAĆ SWÓJ PIN

.....

II. **ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE ISTEL CARE PRZEZ APLIKACJĘ ISTEL HEALTH**

1. Wybierz **TAK**, aby utworzyć konto w Systemie Istel Care (Rys. 2).
- Jeśli nie posiadasz konta w Systemie Istel Care kliknij: Załóż nowe konto w Istel Care (Rys. 3) a następnie uzupełnij formularz (Rys.4)
- Jeśli masz już założone konto w Systemie Istel Care, wybierz Zaloguj (Rys. 3)



Rys. 2

UWAGA!

Twoje hasło powinno składać się z:

- minimum 6 znaków
- co najmniej 1 wielkiej litery
- co najmniej 1 małej litery
- co najmniej 1 cyfry
- znaku specjalnego (np.: /*&%#)


Zapamiętaj swoje hasło. Będzie Ci ono potrzebne do logowania w Systemie Istel Care.



Rys. 3



Rys. 4

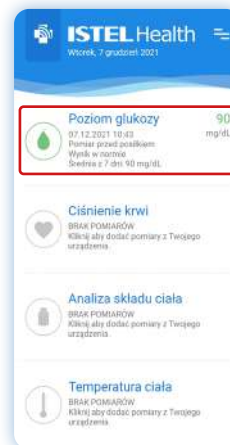

Rys. 5



Rys. 6

TU MOŻESZ WPISAĆ SWOJE HASŁO

III. PRZESŁANIE DANYCH Z URZĄDZEŃ DO APLIKACJI ISTEAL HEALTH:

GLUKOMETR ABRA SMART BT

1. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym (telefonie lub tablecie). W głównym oknie aplikacji Istel Health wybierz **Poziom glukozy** (Rys. 5), a następnie **Połącz** (Rys. 6).



2. Włącz glukometr przyciskiem i poczekaj na wyszukanie urządzenia (Rys. 7).



Rys. 7


3. Pojawi się komunikat z prośbą o wpisanie **kodu PIN** w celu sparowania glukometru z aplikacją (Rys. 8).



Rys. 8

UWAGA! KOD PIN TO 6 CYFR Z NUMERU SERYJNEGO SN z etykiety na odwrocie glukometru (Rys. 9)

- Po literze P w glukometrze ABRA SMART BT
- po literze A w glukometrze ABRA PRO

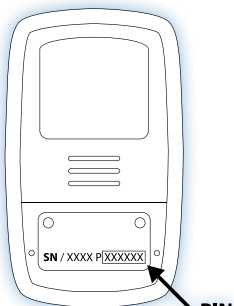

Rys. 9

UWAGA!

Proces parowania przeprowadzany jest jednorazowo.

4. Wybierz **Synchronizuj**, aby przesłać dane z glukometru do aplikacji (Rys. 10).



Rys. 10


5. Twoje wyniki pomiarów będą widoczne po rozwinięciu **Listy pomiarów** w oknie Poziom glukozcy (Rys. 11).



Rys. 11

CIŚNIENIOMIERZ ISTEL CARDIC-100 BT

1. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym (telefonie lub tablecie). W oknie głównym aplikacji Istel Health wybierz **Ciśnienie Krwi** (Rys. 12), a następnie **Połącz** (Rys. 13).

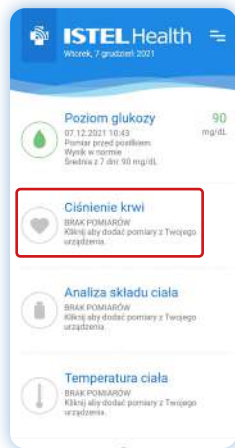




Rys. 12




Rys. 13

2. Pojawi się komunikat z prośbą o wpisanie kodu PIN w celu sparowania ciśnieniomierza z aplikacją (Rys. 14).


UWAGA! KOD PIN TO 6 CYFR, KTÓRE WYŚWIELONE ZOSTANĄ NA EKRANIE CIŚNIENIOMIERZA.

Należy przytrzymać przycisk , Przez ok 4 sek. (zacznie migać ikonka ) , następnie należy 7x kliknąć ten sam przycisk  - Wyświetli się 6-cyfrowy kod PIN (Rys. 15).

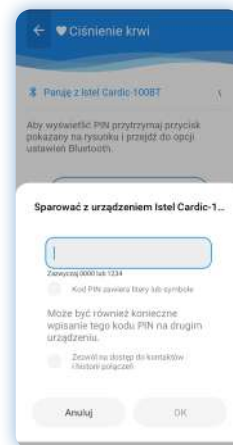


Rys. 14

UWAGA!
Proces parowania przeprowadzany jest jednorazowo.

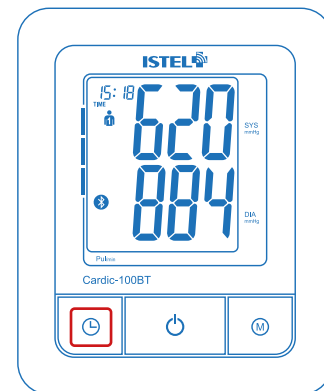

Rys. 15

- Po połączeniu wyświetlone zostaną ustawienia automatyczne: synchronizacja czasu i jednostki na ciśnieniomierzu oraz możliwość wyboru użytkownika 1 lub 2 (Rys. 16).

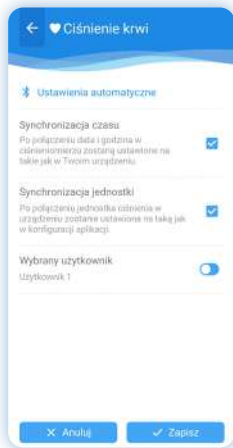

Rys. 16


- Wybierz **Synchronizuj**, aby przesłać dane z ciśnieniomierza do aplikacji. Wybierz **Pomiar**, aby wykonać pomiar (Rys. 17)



Rys. 17

TERMOMETR ISTELE NC 300 BT

- Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym (telefonie lub tablecie). W oknie głównym aplikacji Istel Health wybierz **Temperatura ciała** (Rys. 18), a następnie **Połącz** (Rys. 19).

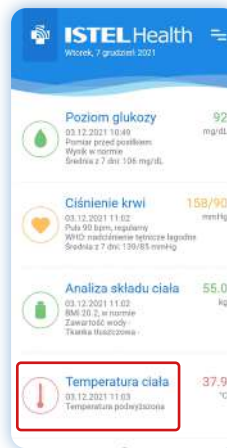

Rys. 18



Rys. 19

3. Aby nawiązać połączenie z urządzeniem, należy włączyć je przyciskiem (Rys. 20).



Rys. 20


4. Wybierz **Pomiar**, aby wykonać pomiar (Rys. 21).



Rys. 21


IV. PRZESYŁANIE DANYCH Z APLIKACJI MOBILNEJ IStel Health NA **KONTO PACJENTA** W SYSTEMIE IStel Care

1. W celu przesłania danych z aplikacji IStel Health na konto Pacjenta w Systemie IStel Care przejdź do ustawień aplikacji wybierając **symbol trzech linii** w prawym górnym rogu w głównym oknie aplikacji (Rys. 22).

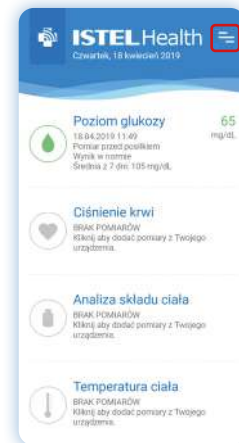


Rys. 22

2. Wybierz „**Konto Istel Care**” (Rys. 23), a następnie **Synchronizuj** (Rys. 24). Dane z aplikacji zostaną automatycznie przesłane do systemu.

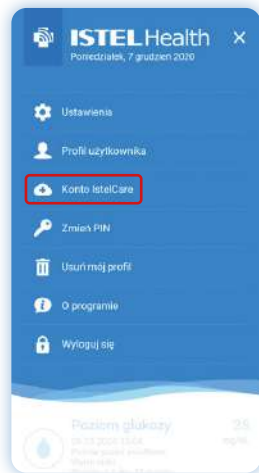

Rys. 23

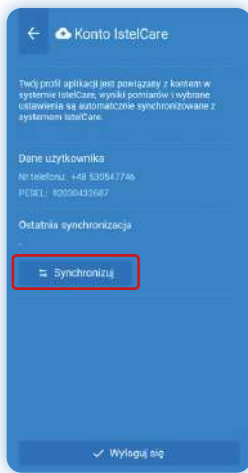

Rys. 24

Gratulacje! Właśnie zostałeś użytkownikiem innowacyjnego rozwiązania telemedycznego jakim jest **System Istel Care**.

Poznaj urządzenia medyczne współpracujące z innowacyjnym rozwiązaniem telemedycznym - Systemem Istel Care

Rejestrator EKG Istel HR-2000

To urządzenie medyczne wyposażone w Bluetooth, rejestrujące sygnały EKG po przyłożeniu do klatki piersiowej, umożliwiając wykonanie **badania EKG** w każdym miejscu i o każdej porze. Wyniki badania trafiają do bezpłatnej aplikacji mobilnej **Istel ECG**, a z niej na Kartę Pacjenta w **Systemie Istel Care**.

Pobierz aplikację Istel ECG z:



Istel ECG

Termometr Istel NC300 BT

To wyposażony w Bluetooth bezdotykowy termometr na podczerwień umożliwiający szybki i **precyzyjny pomiar temperatury** ciała oraz otoczenia. Wyniki badania trafiają do bezpłatnej aplikacji mobilnej **Istel Health**, a z niej na Kartę Pacjenta w **Systemie Istel Care**.



Ciśnieniomierz Istel Cardic-100 BT

To wyposażone w Bluetooth urządzenie z dużym, czytelnym wyświetlaczem, dokonujące pomiaru przy **nieregularnym pulsie** (IHB). Wyniki badania trafiają do bezpłatnej aplikacji mobilnej **Istel Health**, a z niej na Kartę Pacjenta w **Systemie Istel Care**.



Pobierz aplikację Istel Health z:



Urządzenia medyczne z serii Istel kupisz na:

www.diagnosis24.pl

Szukaj też w dobrych aptekach.

NAKŁUWACZ

OPTILET^{MINI}

DO UŻYTKU Z JEDNORAZOWYMI LANCETAMI OPTILETS

LANCETY

OPTILETS

DLACZEGO NALEŻY WYMIENIAĆ LANCETY?

REGULARNA WYMIANA LANCETU:

- Minimalizuje ryzyko zakażenia
- Pozwala na łatwiejsze pobranie próbki krwi
- Zmniejsza odczucie bólu



CE TYLKO DLA NAKŁUWACZA

CE 0197 DOTYCZY LANCETÓW OPTILETS

Potrzebujesz pomocy w obsłudze systemu Istel Care?

Skontaktuj się z nami:

 istelcare@diagnosis.pl

 885 961 858 (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

Odwiedź naszą stronę edukacyjną stworzoną z myślą
o osobach z cukrzycą oraz ich najbliższych

www.StrefaWiedzy.Diagnosis.pl